

**American Diagnostic Corporation**  
55 Commerce Drive  
Hauppauge, NY 11788

Made in China  
Inspected, Assembled, and Packaged  
in the U.S.A.

tel: 631-273-9600  
toll free: 1-800-232-2670  
fax: 631-273-9659

[www.adctoday.com/adview2](http://www.adctoday.com/adview2)  
[info@adctoday.com](mailto:info@adctoday.com)

© 2016 American Diagnostic Corporation.  
ADC, the ADC logo, and ADView are registered trademarks of American Diagnostic Corporation.  
All other trademarks are the property of their respective owners.

**Distributor i Norge:**  
Gymo AS



Medisinsk utstyr og helseartikler

**Telefon:** 40 00 35 22  
**E-post:** [post@gymo.no](mailto:post@gymo.no)  
**Web:** [www.gymo.no](http://www.gymo.no)



Components made  
for ADC by:  
 **SunTech Medical, Inc.**  
507 Airport Boulevard  
Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200

 **SunTech Medical Ltd.**  
Oakfield Industrial Estate  
Eynsham, Oxfordshire  
OX29 4TS UK




# ADView<sup>®</sup> 2



## Brukermanual

## Knapper og funksjoner

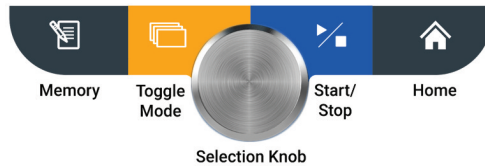

### Minne knapp

- Kort trykk: Lagre måling
- Langt press: (Hold i 4 sekunder): Se lagrede målinger  
(Se side 7-10 for mer informasjon.)



### Toggle knapp

- Kort trykk: Finn og velg mellom automatisk BP mode, gjennomsnittsmode og manual mode.
- Langt press (Hold i 4 sekunder): Bytt mellom pediatrik og voksen måling.  
(Se side 3-6 for mer informasjon.)

For å sette dato og tid hold inne både power knapp og start/stopp knapp samtidig i 6 sekunder. Sett tid med selection knapp.

## Batteri og strøm

Enheten kommer med oppladbart lithium-ion batteri på baksiden av enheten. Når enheten er fulladet vil batteri indikatoren vise dette. ADView kan foreta ca 200 målinger på fulladet batteri.

For å lade, koble til strømkabel. For å lade den til fulladet tar det ca 6 timer.



### Slå på / slå av

For å slå på, press power knapp på siden, Det vil være ett blått LED lys på siden som lyser til enhver tid enheten er på. Ikke hold denne inne mer enn 5 sekunder.

For å slå av, press power knapp på siden. Ikke press per enn 5 sekunder.

Displayet blir da sort og man hører ett bip. Da går enheten i sleep mode.

Enheten vil automatisk slå seg av dersom ingen knapper er trykket på siste time eller ingen målinger er tatt.

## Forebyggende tilbake for SpO<sub>2</sub> koder


Hvis ditt ADView har problemer med å ta målinger kan du se en kode i displayet.



- Ta bort sensoren av pasienten og sørg for at alt er riktig tilkoblet.
- Plasser på annen finger .
- Unngå fingre med neglelakk eller falske negler.
- Gjør ny måling i henhold til seksjon 7 i ADView manual .
- Hvis kode er der fortsatt, slå av og på enheten

(Se side 14 for mer informasjon)

## Knapper og funksjoner (fortsettelse)

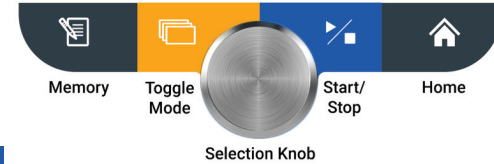


### Start/stopp knapp

- Pres denne knapp for å starte eller stoppe en måling.



### Home knapp

- Press denne knappen for å komme i home skjerm

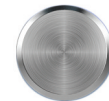



### Selection Knob

Denne roterer i begge retninger og man kan trykke på den for å velge ulike funksjoner på enheten. Denne bruker man også for å endre parametre som f.eks voksen eller pediatrik mode.

## Enkel måling av blodtrykk

Sørg for at skjermen er som dette.

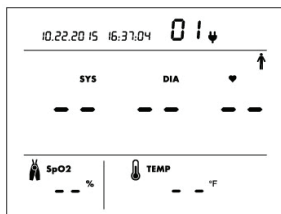

- Sørg for at verdier er borte og viser som over.
- Press start/stopp knapp 
- Måling begynner automatisk og fortsetter til resultatet viser.
- En pipetone gir lyd når måling er ferdig.
- Press start / stopp knapp for å stoppe en måling om nødvendig.

## Forebyggende tiltak for temperatur måling

Hvis ADView har problemer med å ta temperaturmåling kan du se en kode på skjermen.

Dette  vil blinke og vise kode.

*Vanlig forebyggende tiltak viser under:*

- Sørg for at pasient ikke har hatt noen veldig varm drikke i det siste (oral)
- TA ut og inn sensor i beholder. Prøv ny måling. Hvis koder viser fortsatt slå av / på enheten.
- (Se side 14 for mer informasjon)

## Forebyggende tiltak for blodtrykk

Hvis ADView har problem med å ta måling så kan du se kode i displayet.

Dette  vil blinke og vise kode.

*Vanlig forebyggende tiltak for korrekt måling:*

### Mansjett og pasient kontroll:


- Sjekk om mansjett er i riktig posisjon.
- Sjekk om mansjett er tilstrekkelig strammet.
- Sjekk om det er tøy i veien mellom mansjett og hud
- Sjekk at mansjett er i riktig størrelse.
- Sørg for at pasient holder seg i ro under måling
- Når du har sjekket det over , ta ny måling.


### Utstyrssjekk:

- Sørg for at det ikke er skade på slange eller knekk

## Manuell blodtrykksmåling Make sure


Sørg for at skjerm er som dette

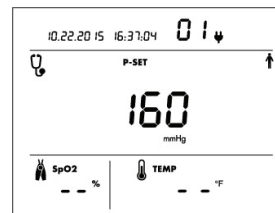



- Velg max overtrykk. Roter selectrion knapp og trykk.
- Plasser stetoskopet.
- Trykk start/stopp knappen 
- Likt som analoge blodtrykksmålere vil skjermen vise mansjett trykket. Når mansjett når max trykk du satte over vil luft pumpes ut av mansjetten.
- Lytt etter K-lyd mens du ser på trykket i displayet  
Noter ned SYS og DIA.

## Gjennomsnittts mode

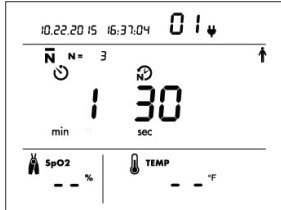


Sørg for at skjerm er som dette.








Når man velger gjennomsnitttsmode vil indikator blinke og du får valg om hvor mange målinger du vil ta  
**N =**

- Velg antall måling med å snu på selection knapp.
- Trykk på selection knapp sett antall målinger
- Når minutt indikator blinker: 
  - Velg antall minutter før første måling
- Velg tid mellom hver måling med å rotere på selection knapp 
- Press på knappen 1 gang når du har valgt det du ønsker
- Timer vil da telle ned før første måling begynner
- Etter alle målinger vil gjennomsnittsmålingen vise.
- En pipetone vil gi lyd når målinger er ferdig.




## Slette målinger fra minne

- Press selection knapp mens man er i memory mode.
- Minne ikon og merke ikon  vil blinke 
- Sørg for at det du vil slette viser
- Trykk selection knapp for å slette  
Roter selection knapp i klokkeretning til  ikon blinker og da trykk for å angre slett.

For å slette alle målinger i minnet

- Press og hold minne knappen  mindre enn 3 sekunder, mens du presser inn selection knapp.
- Minne ikonet  sjekk ikonet  vil blinke. Alle andre verdier på skjermen er blanke
- Trykk selection knapp igjen for å slette alle målinger.  
Roter selection knapp i klokkeretning til  ikon blinker og da trykk for å angre slett. 

## Finn fram målinger i minne

- Trykk og hold minne knappen  i front av enheten i 4 sekunder, så trykk på selection knapp. Bruk selection knapp for å bla gjennom målinger.
- Trykk minneknappen  eller home knapp  for å avslute minnemode


## Voksen eller pediatrik mode



Voksen BP mode ikon



Pediatrik BP mode ikon.

- Trykk Toggle knapp  4 sekunder til voksen eller pediatrik ikon viser.
- Snu selection knapp for å velge mode
- Trykk selection knapp for å velge mode.