



DROPPY - Den universale dråpestøtten


Hvordan bruke **DROPPY** for flasker:




1. Skru av troppen og press flasken ned i dispenseren.



2. Dra huden under øyet forsiktig ned og plasser dispenseren over øyet.

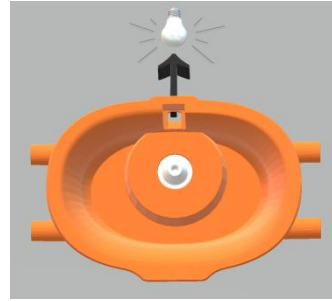


3. Lukk det andre øyet og fokuser opp mot lyset via det lille hullet.

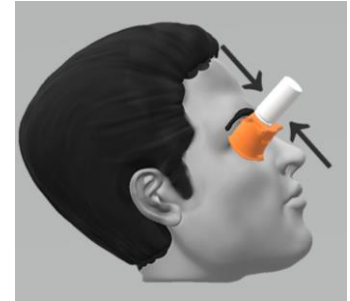


4. Tilt hodet bakover og klem forsiktig på flasken.

Hvordan bruke **DROPPY Klypene** for flasker:

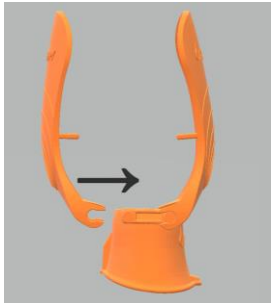


1. Klips *Klypene* på dispenseren.

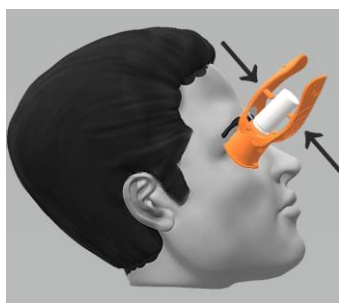

2. Følg stegene som beskrevet ovenfor og press forsiktig på klypene


Hvordan bruke **DROPPY Engangspipettmodul**:

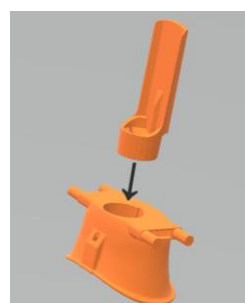

1. Press *Engangspipettmodulen* ned i dispenseren.



2. Plasser engangspipetten ned i *Modulen*.

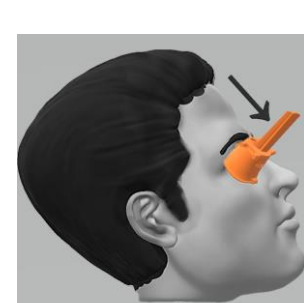



3. Tilt hodet bakover og press fingeren på pipetten.



- Den universale dråpestøtten

Viktig:

- ✓ Vask hendene bestandig før bruk av øyendråper.
- ✓ Følg til enhver tid instruksjonene som følger med flaskene eller engangspipettene.
- ✓ Skyll / Vask dråpestøtten med varmtvann og tørk den med en ren klut etter bruk. Dette for å unngå forurensning og bakterievekst.
- ✓ Bør ikke vaskes i oppvaskmaskin, da det kan ligge rester av såpe eller andre partikler igjen etter vask.
- ✓ Ikke bruk dråpestøtten eller tilhørende deler om noen av delene er skadet. Resirkuler den ødelagte dråpestøtten og erstatt med en ny.
- ✓ Pass på at tuppen av flasken ikke er for lang, da denne kan treffe øyet og påføre skade.
- ✓  er et personlig produkt, som ikke bør benyttes av flere. Anbefaler separate  dråpestøtter for brukere med flere typer øyedråper, for å unngå forurensning mellom medikamentene.
- ✓ Hold produktet unna små barn. Produktet er ikke noe leketøy.



Produktet møter de europeiske kravene for Medisinsk utstyr Klasse I.
Utviklet i Norge av AK Technology AS - Produsert i Sverige.

